

## Notice d'utilisation de la Compresse de Froid



Attention : bien lire la notice avant utilisation

La Compresse de Froid doit être refroidie seule : **sans le bandeau associé.**

### Précaution d'emploi pour une utilisation strictement à froid



Au réfrigérateur : peut être conservé au réfrigérateur



Au congélateur : 2 heures (maximum 3 heures)

Insérer la Compresse dans une poche du bandeau associé pour une utilisation de 20 minutes.



Ne pas appliquer directement sur la peau

Ne pas laisser à la portée des enfants de bas âge

Ne pas mettre dans le bouche : non comestible

Ne pas utiliser si le produit est percé : jeter

Ne pas mettre au four ou au micro-ondes

### Conservation

Peut-être gardé au réfrigérateur. Autrement stocker la compresse dans une pièce à température modérée et à l'abri de la lumière.

### Composition

Glycérol 30% ; Carboxyméthylcellulose 5% ; Eau 73%, bactéricide 0,1%

### Origine

Shanghai Bing Fan Industrial Co. Ltd/Institute of chemical Industry Testing Centre.